

20 januari 2023

Martin Claesson
FRENDAB

Ominstallation av FRENDAB Röntgen

FRENDAB är en molnbaserad plattform som hjälper dig att bedriva tandvård av hög klass. Våra tjänster och funktioner ger din organisation en modern, säker och flexibel vardag.

INNEHÅLL

INNEHÅLL	1
1. Inledning	2
2. Tillvägagångssätt vid byte av dator	2
2.1. Befintlig dator	2
2.2. Ny dator	2

1. Inledning

Detta instruktionsdokument används för ominstallationer av FRENDA Röntgen, till exempel vid datorbyte på en mottagning som använder FRENDA Röntgen idag. Dokumentet fokuserar på de inställningarna som sparas lokalt på datorn och går igenom hur man gör för att se till att samma användarspecifika inställningar följer med till den nya datorn. De inställningar som sparas lokalt på datorn är de som har att göra med den fysiska utrustningen som man har kopplat till FRENDA Röntgen.

När det gäller drivrutiner och kompatibilitet med er nya dator behöver ni ta kontakt med leverantören av utrustningen för att säkerställa att det fungerar optimalt.

Ni behöver också säkerställa att den nya datorn uppfyller FRENDA:s systemkrav innan ni påbörjar datorbytet. Systemkraven hittar ni [här](#).

2. Tillvägagångssätt vid byte av dator

2.1. Befintlig dator

1. Ta en kontrollbild med hjälp av till exempel en aluminiumtrappa eller annat kalibreringsverktyg för att sedan kunna jämföra och säkerställa att kvaliteten är bevarad efter att installationen är genomförd.
2. Kopiera mappen C:\Programdata\Frendaimaging och spara ned den utanför datorn på något sätt.
3. Kopiera bildinställningar kopplade till röntgenutrustningen. Kontakta leverantören av hårdvaran för att få reda på exakt vad som behöver kopieras för att bildkvaliteten ska bevaras efter installationen.
4. Kopiera kalibreringsfiler om det krävs för utrustningen. Exempel på utrustning som kräver manuell hantering av kalibreringsfilerna:

Gendex GXS700 – sökväg C:\Program files (x86)\Gendex\GXS700_Correctionfiles)

Planmeca Prosensor – sökväg C:\Programdata\Planmeca\Didapi\CalibrationFiles\ (Ligger de inte där kan man kolla i programmet C:\ProgramFiles\Planmeca\Didapi\DidapiConfig.exe under fliken Calibration för att se rätt sökväg)

Dentalmind 2 – sökväg C:\Dentalmindservice\DM2\CAL

Dentalmind 3 – sökväg C:\Dentalmindservice\DM3\CAL

2.2. Ny dator

5. Säkerställ att komponenterna Microsoft.Net.Framework har version 4.7.2 eller högre och kontrollera även så att Microsoft Visual C++ 2015 x86 finns installerad. Gör den inte det kan du installera den via följande [länk](#)
6. Installera FRENDA Journal. Instruktion och filer finns [här](#).
7. Installera FRENDA Röntgen genom att ladda ned installationsfilerna [här](#). Kör sedan filerna Frendaimaging_1.96.4.exe och FrendaimagingAllUsers_1.96.4.msi
8. Installera drivrutinen till röntgenutrustningen. OBS! Detta bör göras i samråd med leverantören av utrustningen
9. Ersätt C:\Programdata\Frendaimaging med den mapp du sparade i steg 2.
10. Lägg till Bildinställningarna som sparades i steg 3.
11. Lägg till kalibreringsfilerna om du behövde spara de i steg 4.
12. Ta en ny kontrollbild på samma sätt som i steg 1 och jämför den sedan med bilden som togs då. Har du gjort allt rätt ska de vara identiska.